

Manuale di Proloquo4Text

Versione 4.0

www.assistiveware.com © 2019 Tutti i diritti riservati.



Proloquo4Text™

Scrivi. Parla. Comunica.



1. Introduzione a Proloquo4Text	3	9. Opzioni: aspetto	15
Introduzione		Organizzare le schede rapide	
La casella di testo		Personalizzare l'aspetto dei suggerimenti	
Supporto per più lingue		10. Opzioni: lingua e voce	16
Accedere al manuale nell'app		Scegliere le voci	
2. Assistente di configurazione	5	Gestire le lingue	
Configurazione		Controllare la riproduzione	
Creare un utente		Pronunciare gli elementi delle schede rapide	
Aggiungere utenti o voci		11. Opzioni: suggerimenti	17
3. L'interfaccia	6	Suggerimento parole	
Elementi principali dell'interfaccia		Suggerimento frasi	
Cambiare scheda rapida		Espansione abbreviazioni	
Differenze tra iPad e iPhone		12. Opzioni: restrizioni	18
Comunicare		Limitare le modifiche e la condivisione	
Personalizzare i contenuti		Impostare la condivisione	
4. Le schede rapide	8	13. Opzioni: privacy	19
Schede rapide		Uso privato	
Frase		Cancellare la cronologia e il resoconto frasi	
Espressioni rapide		14. Opzioni: backup	20
Cronologia		L'importanza dei backup	
Conversazioni		Effettuare un backup	
Suggerimento parole		Esportare un backup	
Suggerimento frasi		Importare un backup	
5. Modalità di modifica	10	Ripristinare un backup	
Funzionalità della modalità di modifica		Istruzioni più dettagliate	
Modificare gli elementi		15. Opzioni: blocco delle opzioni	21
Spostare elementi fra le categorie		Blocco delle opzioni	
Nascondere gli elementi		16. Opzioni:	
Modificare le proprietà		Informazioni, assistenza e novità	22
iPhone		Informazioni e Assistenza	
6. Uso di una tastiera esterna	12	Aiuto contestuale	
Cambiamenti dell'interfaccia		Novità	
Abbreviazioni da tastiera			
7. Opzioni	13		
Opzioni utente			
Opzioni generali			
8. Opzioni: creazione di un nuovo utente	14		
Più utenti			
Creare gli utenti			
Cambiare utente			
Eliminare un utente			



1. Introduzione a Proloquo4Text


INTRODUZIONE

Proloquo4Text™ è un'app per la comunicazione aumentativa e alternativa (CAA) basata su testo progettata per persone che non sono in grado di parlare o hanno difficoltà a farsi comprendere. Proloquo4Text è stata ideata per permettere una comunicazione di tipo testuale rapida e flessibile e offre supporto per gli utenti multilingue.


LA CASELLA DI TESTO

La **casella di testo** (1) è il centro di comando di Proloquo4Text. Utilizzando la tastiera, puoi inserire nella casella di testo tutto quello che desideri

pronunciare. Il **suggerimento parole** (2) e il **suggerimento frasi** (3) potranno aiutarti a comunicare con minore sforzo. Inoltre, con le **schede rapide** hai a portata di mano tante altre comode funzioni. Accedi alla **cronologia** per ripetere qualcosa senza doverlo scrivere di nuovo. Organizza le frasi che utilizzi comunemente nella scheda **Frasi** (5) per potervi accedere rapidamente. Utilizza la scheda **Espressioni rapide** (4) per inserire velocemente interiezioni durante una conversazione. E con la scheda **Conversazioni** puoi passare facilmente da una conversazione all'altra. ►

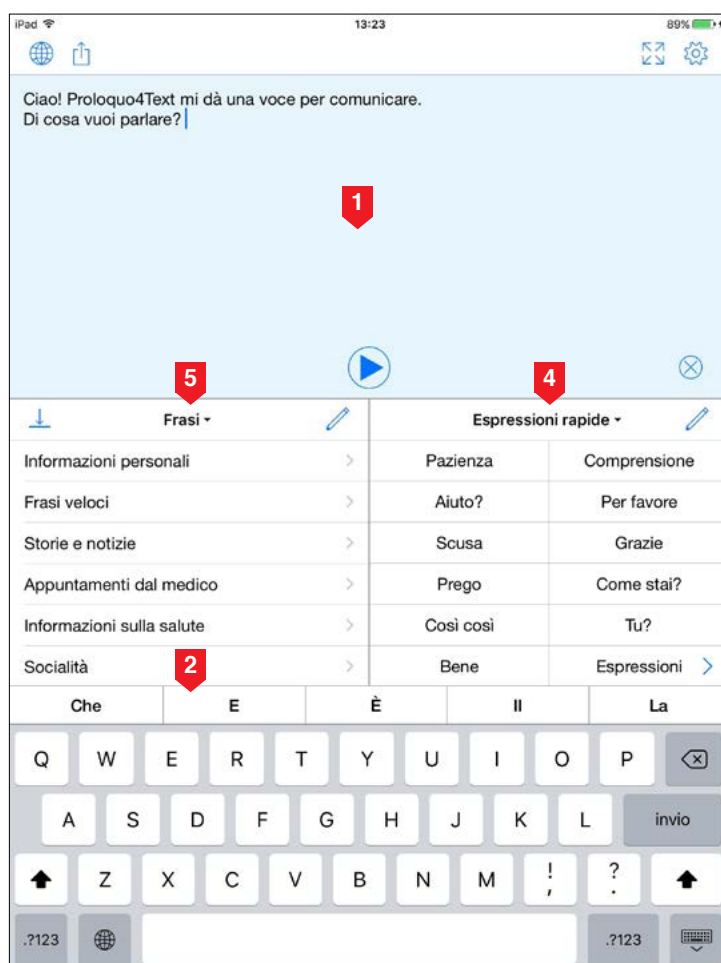

iPad

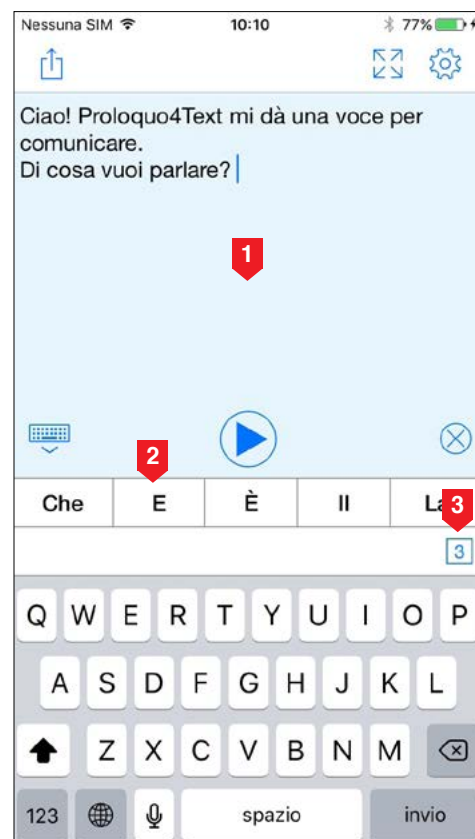

iPhone




SUPPORTO PER PIÙ LINGUE

Se parli più di una lingua e utilizzi più di una tastiera su iOS, Proloquo4Text cambierà automaticamente la lingua dei suggerimenti, delle frasi e di altri contenuti ogni volta che passi da una tastiera all'altra. Se invece preferisci utilizzare una sola tastiera di iOS per tutte le lingue che parli, puoi configurare manualmente le lingue nelle opzioni di Proloquo4Text e usare il **pulsante** (1) apposito per passare da una lingua all'altra.

Questo manuale ti fornirà ulteriori informazioni sull'utilizzo e sulla configurazione di Proloquo4Text.

ACCEDERE AL MANUALE NELL'APP

Ricorda che puoi accedere a questo manuale direttamente dall'app selezionando **Opzioni** (2) e quindi scegliendo **Assistenza**, quindi **Manuale**.

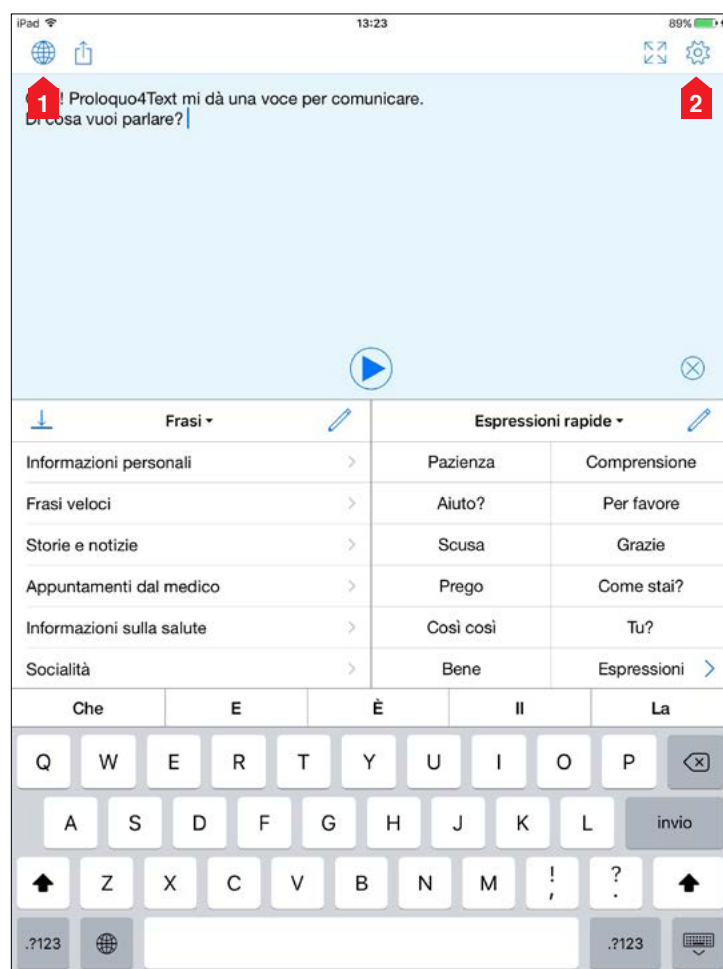



2. Assistente di configurazione

CONFIGURAZIONE



Al primo avvio di Proloquo4Text, verrai aiutato nella configurazione iniziale da un assistente.

CREARE UN UTENTE

Inserisci il nome dell'utente (1), quindi tocca il pulsante **Avanti** (2). Ora scegli una **voce** (3), che verrà scaricata quando avrai terminato la procedura guidata e toccato il pulsante **Avanti** (4). Durante il download della voce selezionata, verrà utilizzata una voce sostitutiva di qualità inferiore, così potrai iniziare a subito comunicare.

AGGIUNGERE UTENTI O VOCI

Dopo la configurazione iniziale, vai alle opzioni di Proloquo4Text per creare altri utenti o aggiungere altre lingue e voci, che potrai scaricare gratuitamente.

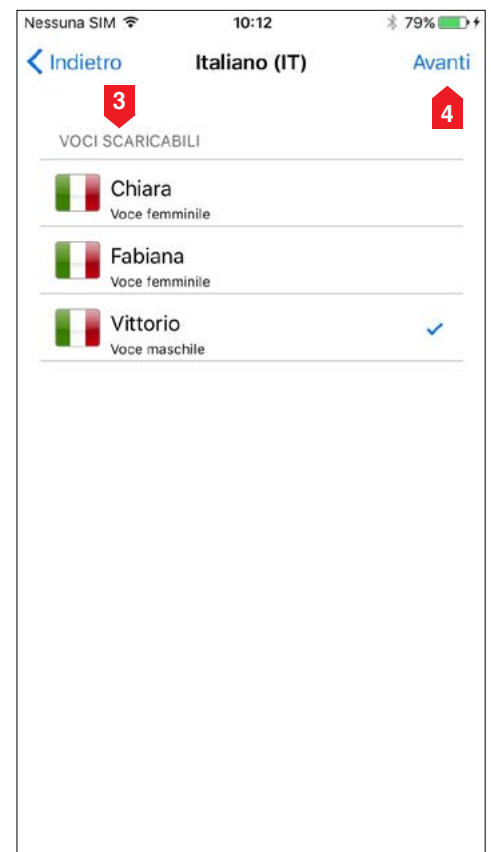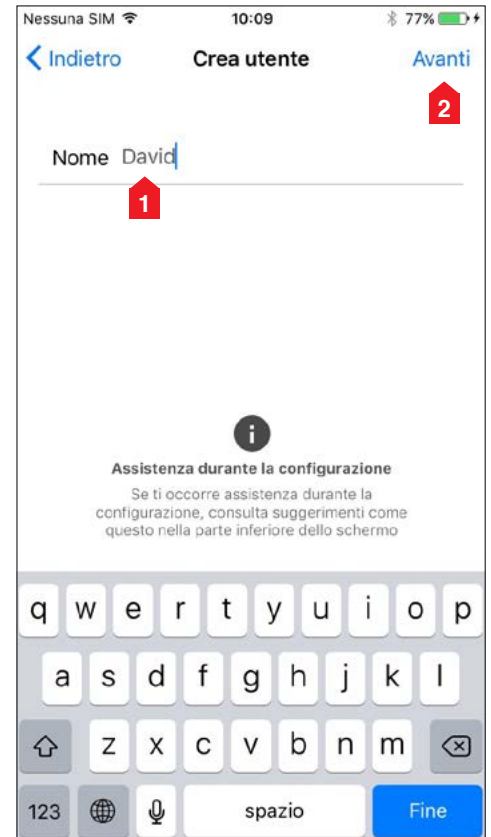



3. L'interfaccia

ELEMENTI PRINCIPALI DELL'INTERFACCIA

Proloquo4Text ti consente di esprimerti in maniera facile ed efficace. Tocca un punto qualsiasi della **casella di testo** per visualizzare la tastiera e iniziare a digitare. Utilizza la tastiera su schermo con l'avanzato sistema di **suggerimento testo** PolyPredix™ che impara ciò che dici oppure utilizza una tastiera Bluetooth esterna.


Le **schede rapide** ti consentono di accedere rapidamente alle categorie personalizzabili **Frase** (per le frasi comuni), **Espressioni rapide** (per l'inserimento rapido delle interiezioni), **Conversazioni** (per passare facilmente da una

conversazione all'altra), **Suggerimento frasi**, **Suggerimento parole** e **Cronologia**.

In **Opzioni**, puoi stabilire quali **schede rapide** utilizzare e dove visualizzarle. Puoi inoltre personalizzare i colori, i font e altro ancora.

CAMBIARE SCHEDA RAPIDA

Puoi cambiare **scheda rapida** toccando il titolo della scheda desiderata. Se tocchi e tieni premuto vedrai l'elenco delle **schede rapide**, che ti permette di passare direttamente a una **scheda rapida** specifica. Per mostrare o nascondere temporaneamente una **scheda rapida**, tocca il pulsante di visibilità. ►

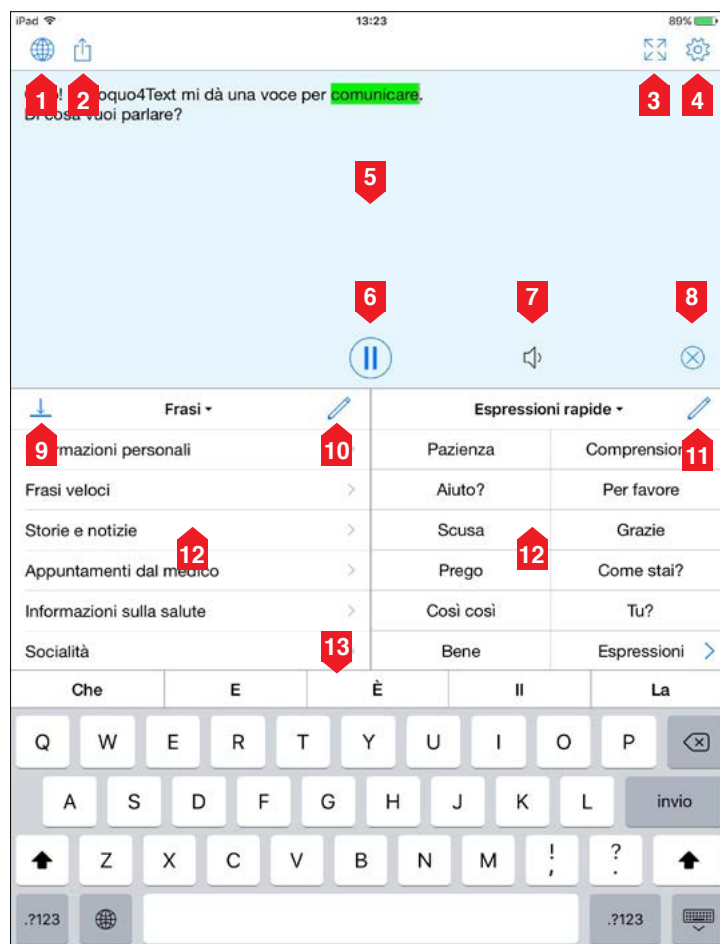

1. Cambia lingua*
2. Condividi
3. Schermo intero
4. Opzioni
5. Casella di testo
6. Riproduci/pausa
7. Indicatore suono
8. Cancella casella di testo
9. Visibilità schede rapide
10. Aggiungi conversazione
11. Modifica scheda rapida
12. Schede rapide
13. Suggerimento parole

*Questo pulsante è disponibile solo quando la gestione delle lingue è impostata su Manuale. Vedi il capitolo 10 per maggiori informazioni.



DIFFERENZE TRA IPAD E IPHONE

Su iPhone, per accedere alle **schede rapide** è necessario nascondere la tastiera utilizzando il pulsante **Apri/chiudi tastiera** (1) nella parte inferiore della casella di testo. Su iPad, i **suggerimenti frasi** sono disponibili in una **scheda rapida**, mentre, per accedervi su iPhone, devi toccare il piccolo quadrato (2) con il numero delle frasi corrispondenti sulla seconda riga dei **suggerimenti parole**.



COMUNICARE

Il testo può essere pronunciato mentre digiti, oppure puoi premere il pulsante **Riproduci** quando hai finito di scrivere (puoi configurare questo comportamento in **Opzioni**). Utilizza il pulsante **Condividi** per condividere il testo via e-mail, Messaggi, Twitter o per copiarlo negli appunti.

Se desideri comunicare in modo silenzioso, tocca il pulsante **Schermo intero** (3) per visualizzare il contenuto della casella di testo a tutto schermo. Nella modalità a schermo intero, puoi utilizzare il pulsante **Capovolgi** (4) per rendere il testo facilmente leggibile da una persona davanti a te.

PERSONALIZZARE I CONTENUTI

Tocca il pulsante **Modifica** per modificare i contenuti di **Frase** ed **Espressioni rapide** o per eliminare voci specifiche dall'elenco della **cronologia**.

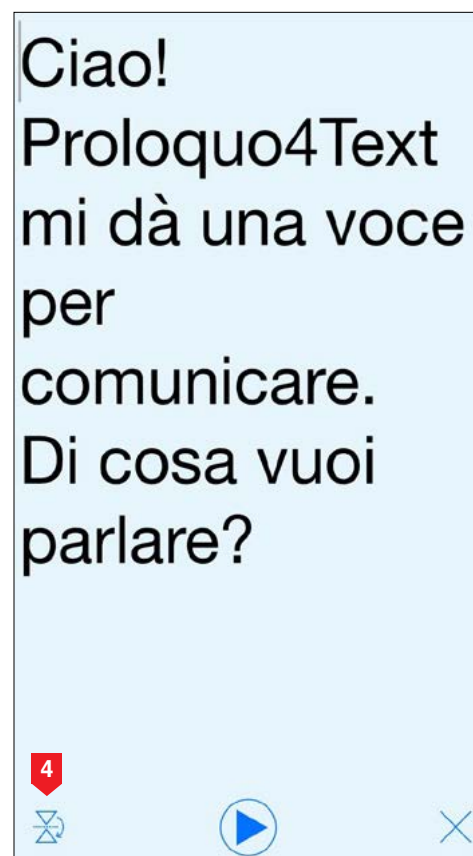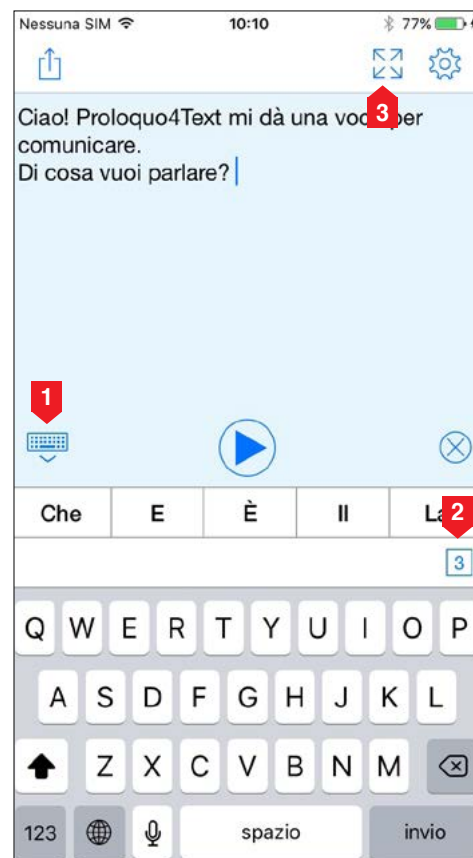



4. Le schede rapide

SCHEDE RAPIDE

Le **schede rapide** disponibili per aiutarti a velocizzare la conversazione sono sei: **Frase**, **Espressioni rapide**, **Conversazioni**, **Cronologia**, **Suggerimento parole** e **Suggerimento frasi**.

Le ultime due non sono disponibili come schede rapide su iPhone perché sono integrate nella barra "Suggerimento parole".

FRASI

Utilizza **Frase** per memorizzare le frasi, i periodi e persino i paragrafi che utilizzi comunemente. Aggiungi una nuova frase alla categoria attuale selezionando il testo nella casella di testo e toccando l'opzione "Crea frase" nel menu di modifica. In alternativa, tocca il pulsante Modifica nella barra di navigazione per modificare,

aggiungere o eliminare le frasi. Puoi organizzare i contenuti in categorie. Puoi anche assegnare un'abbreviazione a ciascun elemento, in modo da poterla digitare per inserire il testo dell'elemento nella casella di testo. Di default, toccando una volta una frase ne inserirai il testo nella casella di testo, mentre, toccandola e tenendola premuta, il testo verrà pronunciato immediatamente. Puoi modificare questo comportamento nella sezione **Pronuncia elementi** delle opzioni **Lingua e voce**.

Frase ▾	
Informazioni personali	>
Frase veloci	>
Storie e notizie	>
Appuntamenti dal medico	>
Informazioni sulla salute	>
Socialità	>

Espressioni rapide ▾	
Pazienza	Comprensione
Aiuto?	Per favore
Scusa	Grazie
Prego	Come stai?
Così così	Tu?
Bene	Espressioni >

Conversazioni ▾	
Ciao! Proloquo4Text mi dà una voc...	

Cronologia ▾	
Ultimi 15 minuti	
Ciao! Proloquo4Text mi dà una voce per...	

Suggerimento parole ▾	
Chi	
Chiama	
Chiamato	
Chiaro	
Chiesa	
Chiesto	

Suggerimento frasi ▾	
Aiutami a cambiare posizione, per favore.	
Aspetta, ti sto scrivendo un messaggio.	
Bene, grazie.	
Bene.	
Buona giornata!	
Capisco tutto quello che dici, ma devo u...	



ESPRESSIONI RAPIDE

Utilizza **Espressioni rapide** per accedere velocemente alle interiezioni e alle espressioni più comuni mentre comunichi. Di default, toccando una volta un elemento di **Espressioni rapide**, il testo verrà pronunciato immediatamente e non verrà inserito nella casella di testo. In questo modo potrai fare un commento veloce senza alterare il testo su cui stai lavorando nella casella di testo. Di default, toccando e tenendo premuto, il testo verrà inserito nella casella di testo. Puoi modificare questo comportamento nella sezione **Pronuncia elementi** delle opzioni **Lingua e voce**.

CRONOLOGIA

Utilizza la **cronologia** per ripetere facilmente una cosa detta in precedenza. Con un solo tocco inserirai il testo nella casella di testo, mentre, toccando e tenendo premuto, il testo verrà pronunciato immediatamente. Puoi modificare questo comportamento nella sezione **Pronuncia elementi** delle opzioni **Lingua e voce**. Ricorda che il testo viene aggiunto alla cronologia ogni volta che tocchi il pulsante Riproduci. Scorrendo verso il basso nella cronologia, comparirà un campo che ti permette di cercare un testo specifico.

CONVERSAZIONI

Utilizza **Conversazioni** per passare facilmente da una conversazione all'altra. Per esempio, puoi rispondere a una domanda di una seconda conversazione senza alterare il testo che stavi scrivendo nella prima.

SUGGERIMENTO PAROLE

Utilizza **Suggerimento parole** per digitare in modo più veloce. Il sistema di suggerimento apprende automaticamente le nuove parole e combinazioni di parole. Di conseguenza, apprende anche gli errori di battitura; tuttavia, se smetterai di ripetere l'errore, dopo qualche tempo il sistema lo rimuoverà. Puoi configurare il sistema di suggerimento delle parole nella sezione **Suggerimenti** delle opzioni, limitando l'apprendimento alle parole scritte correttamente.

SUGGERIMENTO FRASI

Utilizza **Suggerimento frasi** per accedere rapidamente alle frasi che usi più di frequente che iniziano con il testo che hai inserito. **Suggerimenti frasi** comprende sia le frasi inserite di recente che quelle personali.



5. Modalità di modifica


FUNZIONALITÀ DELLA MODALITÀ DI MODIFICA

Per modificare gli elementi in Frasi o “Espressioni rapide”, tocca il pulsante **Modifica** per accedere alla modalità di modifica. Nella modalità di modifica, puoi **aggiungere** nuove categorie ed elementi, **tagliare**, **copiare** e **incollare**, **eliminare** contenuti oppure modificare quelli esistenti. Per uscire dalla modalità di modifica, premi **Fine** nell'angolo in alto a destra dello schermo. Se non visualizzi il pulsante **Fine**, significa che sei nella modalità di selezione e che devi prima toccare **Fine** nell'angolo in basso a sinistra dello schermo oppure, su iPhone, devi prima utilizzare il pulsante Indietro per tornare all'elenco degli elementi.

Ricorda che puoi creare rapidamente degli elementi incollando un elenco di frasi (una frase per riga) da un'altra app e poi toccando **Aggiungi** in modalità di modifica.

MODIFICARE GLI ELEMENTI

Per modificare un elemento, selezionalo. Per modificare più elementi alla volta, tocca **Seleziona**, quindi tocca gli elementi desiderati. Se vuoi riordinare gli elementi, tocca **Seleziona**, premi le tre linee accanto all'elemento che desideri spostare, quindi trascinalo nella nuova posizione.

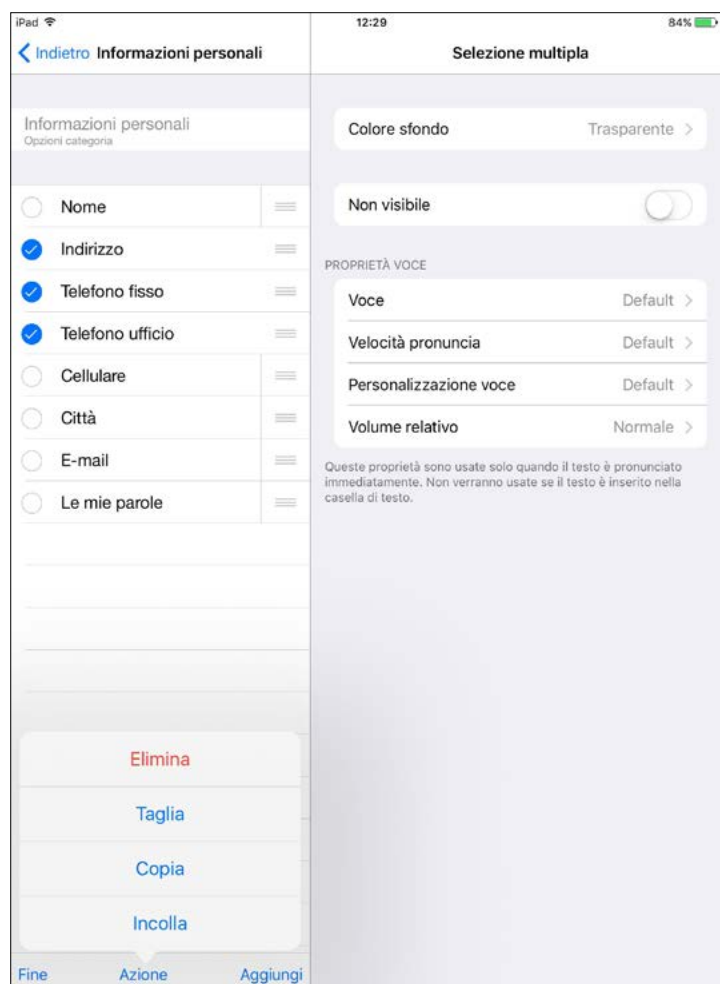



SPOSTARE ELEMENTI FRA LE CATEGORIE

Per spostare degli elementi da una categoria all'altra, tocca **Seleziona**, quindi tocca gli elementi desiderati. Tocca **Azione** e scegli **Taglia**. Ora naviga fino alla nuova categoria, tocca **Azione** e seleziona **Incolla**.

NASCONDERE GLI ELEMENTI


Imposta le categorie o gli elementi su **Non visibile** se non vuoi che siano visibili durante il normale utilizzo. Ricorda che gli elementi nascosti possono sempre essere usati come espansione di abbreviazioni.

MODIFICARE LE PROPRIETÀ

Per ogni elemento, puoi anche modificare l'aspetto e le proprietà relative alla voce. Ricorda che le proprietà relative alla voce hanno effetto solo sul testo pronunciato immediatamente, non su quello inserito nella casella di testo.

IPHONE

Su iPhone, hai accesso alle stesse funzionalità di modifica disponibili su iPad. La differenza principale sta nel fatto che non potrai vedere gli elementi o le categorie sulla stessa schermata delle proprietà.

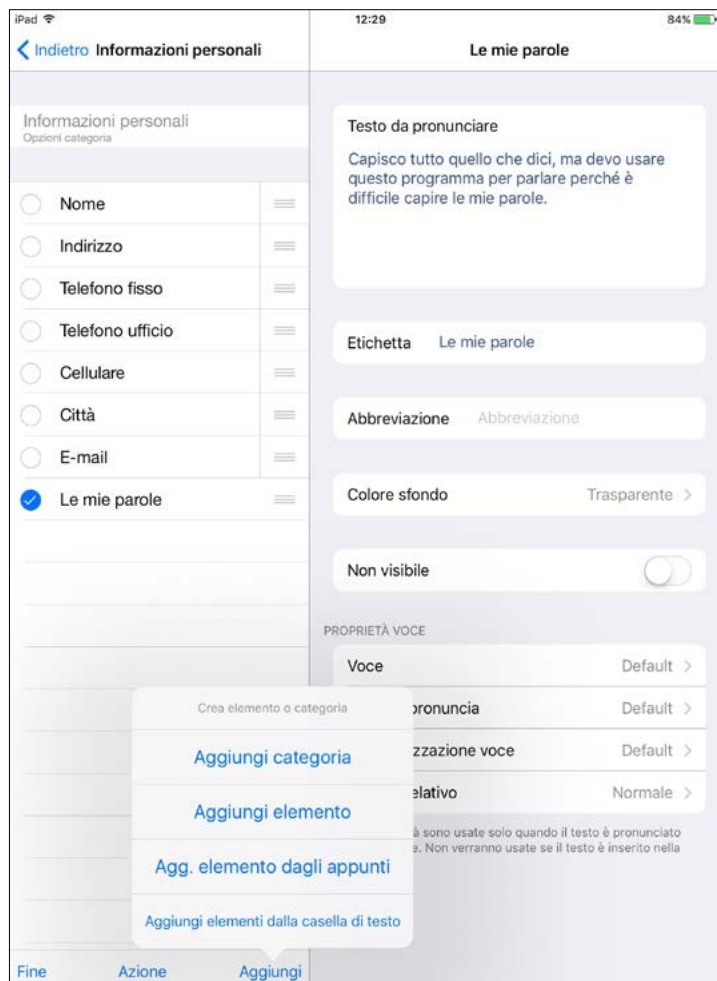




6. Uso di una tastiera esterna

CAMBIAMENTI DELL'INTERFACCIA

Quando colleghi una tastiera Bluetooth o una custodia con tastiera, la tastiera su schermo scompare. Il suggerimento parole resta comunque disponibile, a meno che tu non lo abbia disattivato. Nell'angolo in basso a destra di ogni suggerimento vedrai un numero, che corrisponde al numero da premere sulla tastiera per selezionarlo. Toccando il **pulsante** (1) a destra nella barra dei suggerimenti puoi scegliere se utilizzare i tasti numerici per digitare i numeri o per selezionare un suggerimento.

ABBREVIAZIONI DA TASTIERA

Puoi premere Comando-Invio per avviare o mettere in pausa la pronuncia del testo, Comando-K per cancellare la casella di testo e Comando-O per cambiare la funzione dei tasti numerici (digitare numeri o selezionare i suggerimenti parole). Inoltre, sono disponibili tutte le abbreviazioni standard da tastiera esterna supportate da iOS.

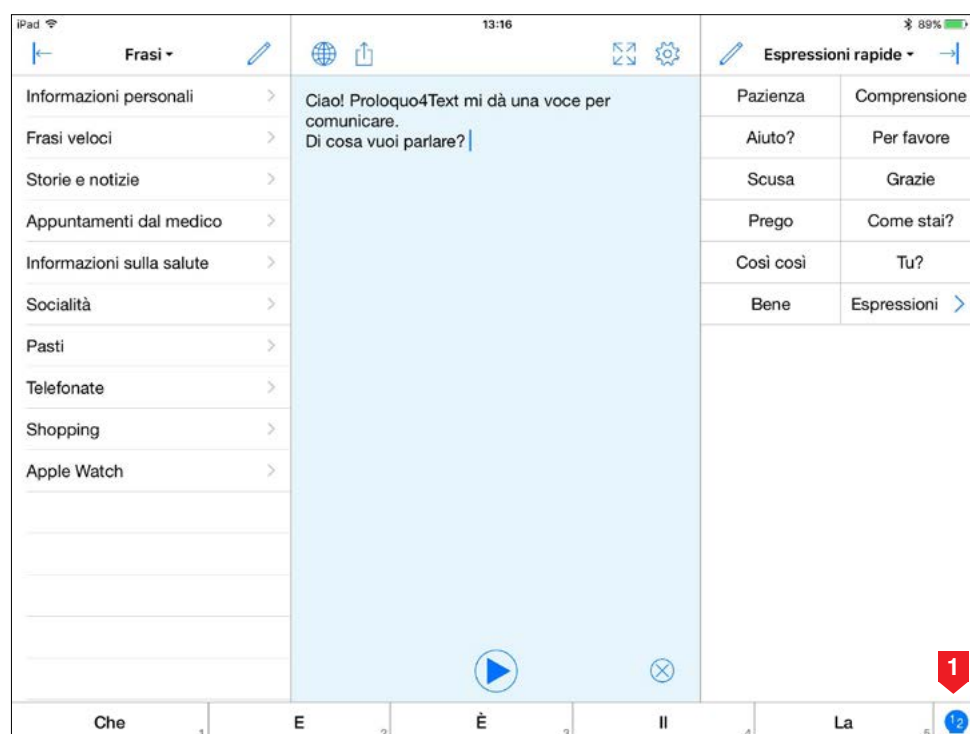



7. Opzioni

OPZIONI UTENTE

Per accedere a **Opzioni**, tocca l'icona dell'ingranaggio. In **Opzioni**, puoi creare **utenti** aggiuntivi, configurare l'**aspetto** di Proloquo4Text, configurare **lingue e voce** e regolare i **suggerimenti**. In **Restrizioni**, puoi limitare l'accesso a determinate funzionalità. Inoltre, è presente una sezione per controllare la **privacy**.

OPZIONI GENERALI

Sono presenti anche varie opzioni generali che hanno effetto su tutti gli utenti, tra cui **Backup**, **Blocca opzioni** (imposta una password per impedire a studenti o bambini di modificare le opzioni), **Informazioni** (maggiori informazioni su Proloquo4Text), **Assistenza** (trova il manuale nell'app, scopri risorse di apprendimento o contatta il servizio assistenza) e **Novità** (aggiornamenti di AssistiveWare).





8. Opzioni: creazione di un nuovo utente

PIÙ UTENTI

Nella sezione **Utenti** delle opzioni, puoi creare configurazioni per più utenti.

Ogni utente può avere le proprie impostazioni che controllano la voce utilizzata, le opzioni relative all'aspetto e altro ancora. Può essere utile in un ambiente formativo, dove un dispositivo viene condiviso da più studenti, ma può essere comodo anche per un terapeuta che desidera valutare Proloquo4Text con pazienti con bisogni molto diversi.

CREARE GLI UTENTI


Tocca **Nuovo utente** (1) per iniziare con una scheda vuota e impostazioni di default, oppure tocca **Duplica utente esistente** (2) per usare un utente esistente come base per quello nuovo.

CAMBIARE UTENTE

Per passare da un utente all'altro, tocca il nome dell'utente a cui vuoi passare.

ELIMINARE UN UTENTE

Per rimuovere un utente, tocca il pulsante **Modifica** (3) ed elimina l'utente che desideri. Ricorda che non è possibile eliminare l'utente attualmente in uso.

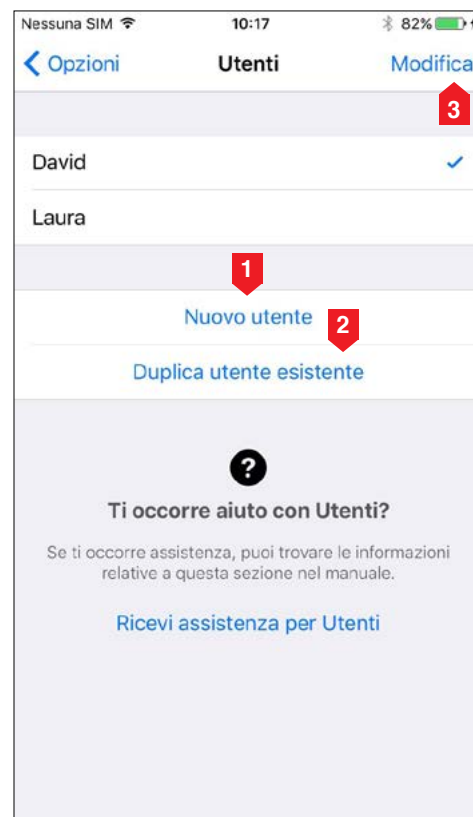



9. Opzioni: aspetto

ORGANIZZARE LE SCHEDE RAPIDE

Nella sezione **Aspetto** delle opzioni, puoi configurare la dimensione delle icone, nonché l'aspetto della **casella di testo** e delle **schede rapide**. Per ogni scheda rapida, puoi decidere se deve essere **visibile** o **nascosta** e, su iPad, puoi decidere anche se deve essere visualizzata sul lato sinistro o destro dello schermo. Puoi impostarle in maniera tale che siano tutte su un lato, così da avere una casella di testo più grande, o persino nasconderle tutte per avere una casella di testo a schermo intero.

PERSONALIZZARE L'ASPETTO DEI SUGGERIMENTI

Puoi mostrare o nascondere la barra dei **suggerimenti tastiera** e personalizzare il **font**.



10. Opzioni: lingua e voce

SCEGLIERE LE VOCI

Nella sezione **Lingua e voce** delle opzioni, puoi scegliere la voce (o le voci) da utilizzare per ogni **lingua attiva**.

GESTIRE LE LINGUE


Imposta **Gestione lingue** su **Automatica** se desideri che le lingue disponibili vengano determinate dalle tastiere di iOS attive (selezionate nell'app Impostazioni del dispositivo). Imposta la gestione su **Manuale** se preferisci utilizzare una tastiera per tutte le lingue e vuoi selezionare quelle che deve supportare Proloquo4Text tra le lingue per cui dispone di voci.

CONTROLLARE LA RIPRODUZIONE

Per la casella di testo, puoi stabilire come dev'essere pronunciato il testo durante la digitazione o quando premi il pulsante di riproduzione. Attiva **Rileva lingua automaticamente** se sono presenti più lingue attive e vuoi che Proloquo4Text individui automaticamente la lingua e la voce da usare per pronunciare testi composti da frasi in diverse lingue.

PRONUNCIARE GLI ELEMENTI DELLE SCHEDE RAPIDE

Infine, per le **schede rapide**, puoi decidere se gli elementi devono essere pronunciati anziché inseriti nella casella di testo quando vengono **toccati** o **toccati e tenuti premuti**.

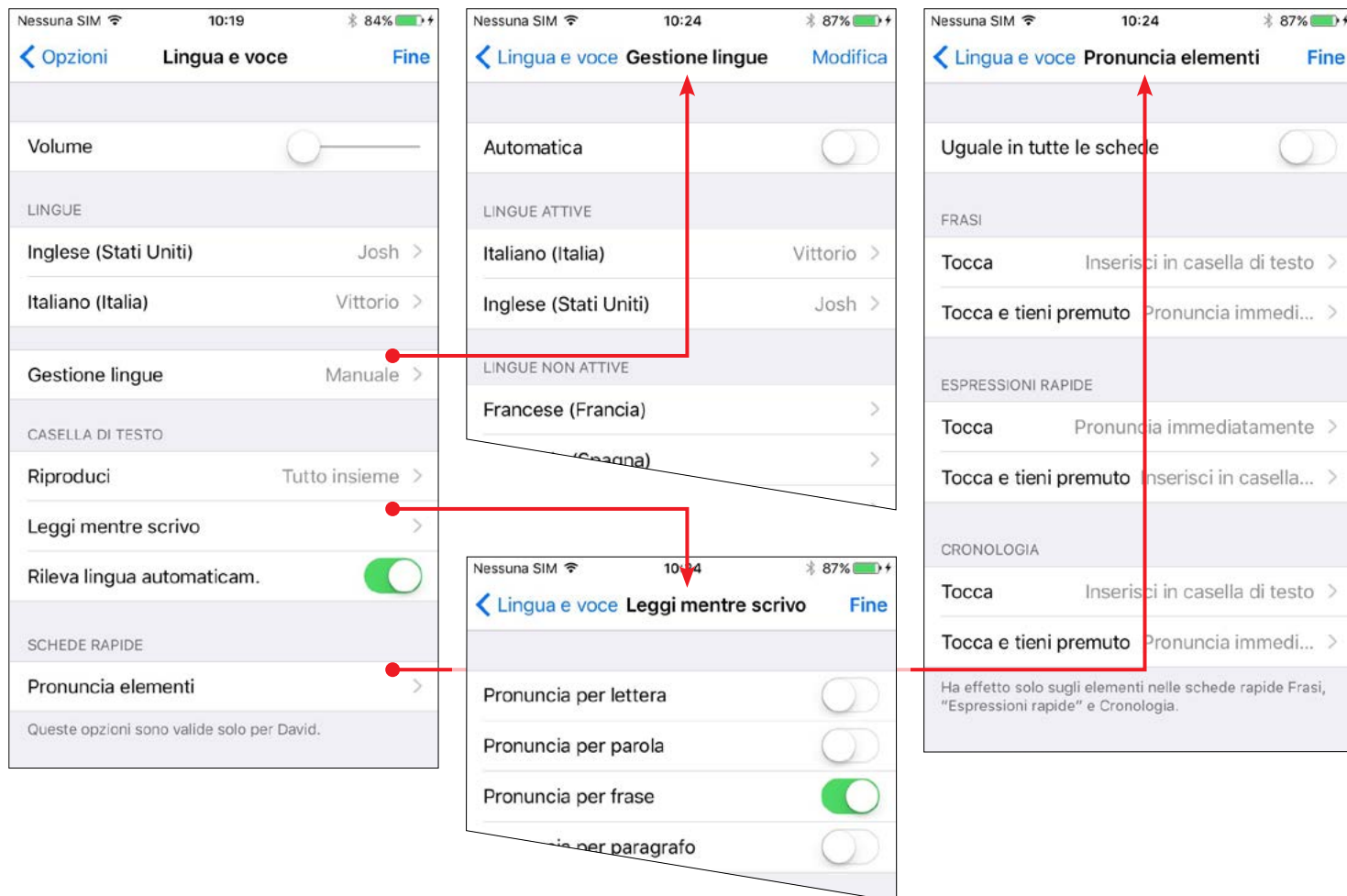



11. Opzioni: suggerimenti

SUGGERIMENTO PAROLE

Disattiva **Spaziatura automatica** se non desideri inserire automaticamente uno spazio dopo aver selezionato un suggerimento. Disattiva **Suggerimenti multi-parola** se desideri che ogni suggerimento sia composto da una singola parola e mai da parole multiple come “per favore”.

Imposta **Apprendimento** su **Parole scritte correttamente** se non vuoi che Proloquo4Text apprenda parole non presenti nel dizionario integrato di Apple o disattiva del tutto l'apprendimento impostandolo su No. Se consenti a Proloquo4Text di apprendere **tutte le parole**, il suggerimento parole funzionerà ovviamente meglio; tuttavia, se l'utente tende a commettere molti errori, potrebbe essere utile consentire solo l'apprendimento delle parole scritte in modo corretto. Ricorda che non è possibile rimuovere manualmente le parole con errori. Se però non verranno più utilizzate, dopo qualche tempo saranno rimosse automaticamente.

Con le altre opzioni relative ai suggerimenti, puoi determinare il numero di suggerimenti offerti e il modo in cui vengono ordinati.

SUGGERIMENTO FRASI

Imposta il numero massimo di suggerimenti e il modo in cui vengono ordinati.

ESPANSIONE ABBREVIAZIONI

Tocca **Espandi** per stabilire quale azione attiverà l'espansione delle abbreviazioni.





12. Opzioni: restrizioni

LIMITARE LE MODIFICHE E LA CONDIVISIONE

Nella schermata Restrizioni, puoi disattivare l'opzione **Consenti modifiche** per **Frase** ed **Espressioni rapide** oppure disattivare l'opzione **Consenti condivisione** del testo presente nella casella di testo via e-mail, Messaggi e Twitter.

Ricorda che se vuoi impedire all'utente di annullare queste restrizioni, devi utilizzare la funzionalità "Blocca opzioni" (vedi capitolo 15) per proteggere le opzioni con una password.

IMPOSTARE LA CONDIVISIONE

Ricorda che per utilizzare e-mail, Messaggi e Twitter devi configurare i relativi account nelle impostazioni del dispositivo.






13. Opzioni: privacy

USO PRIVATO

Imposta l'opzione **Uso privato** su Sì per condurre una conversazione del tutto privata durante la quale Proloquo4Text non memorizza nessuna delle parole o delle frasi inserite. In questo modo, la validità dei suggerimenti risulterà sensibilmente ridotta, ma, se qualcuno in seguito dovesse accedere all'app, avrai la certezza che non potrà visualizzare ciò che è stato detto.

CANCELLARE LA CRONOLOGIA E IL RESOCONTO FRASI

Utilizza **Cancella cronologia** e **Cancella resoconto frasi** per eliminare qualsiasi informazione memorizzata in precedenza. L'eliminazione del resoconto frasi avrà un effetto significativo sulla validità dei suggerimenti, mentre ciò non succederà per la cancellazione della cronologia.

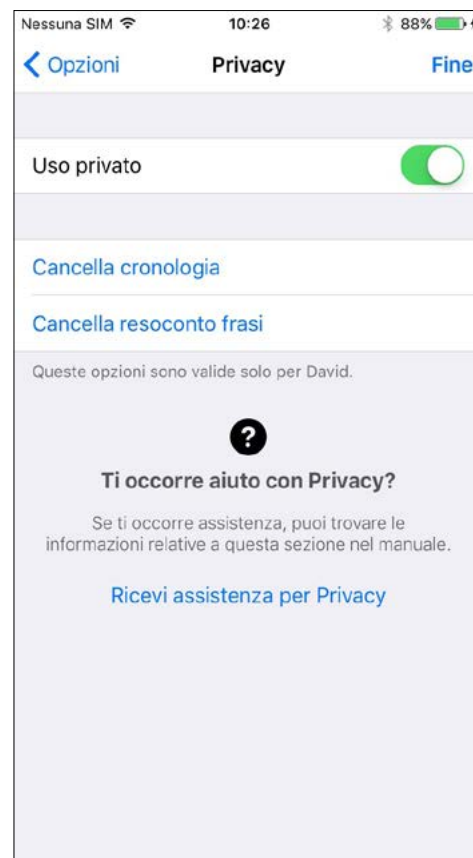



14. Opzioni: backup

L'IMPORTANZA DEI BACKUP

È importante realizzare regolarmente dei backup da archiviare al di fuori del dispositivo. Puoi trasferire i backup sul computer utilizzando la condivisione file di iTunes, AirDrop o utilizzare il supporto per Dropbox o Google Drive integrato. Puoi trasferire i backup dal computer o da Dropbox o Google Drive su un altro dispositivo o inviarli a qualcun altro via e-mail o AirDrop.

EFFETTUARE UN BACKUP

Tocca **Backup di [nome utente] adesso** per effettuare il backup dei dati dell'utente attuale o tocca **Backup di tutti gli utenti adesso** per effettuare il backup di tutti gli utenti di Proloquo4Text. Questa operazione produrrà dei backup interni. Per assicurarti di non perdere le configurazioni personalizzate, è consigliabile esportare regolarmente i backup su iTunes, Dropbox o Google Drive.

ESPORTARE UN BACKUP


Tocca **Esporta backup** per esportare un backup su iTunes, su Dropbox, Google Drive o AirDrop.

IMPORTARE UN BACKUP

Per importare un backup da iTunes, tocca **Importa backup**. Per importare un backup da Dropbox o Google Drive, apri il file di backup .p4tbk nell'app Dropbox o Google Drive.

RIPRISTINARE UN BACKUP

Per ripristinare un backup esistente, utilizza **Ripristina da backup**.

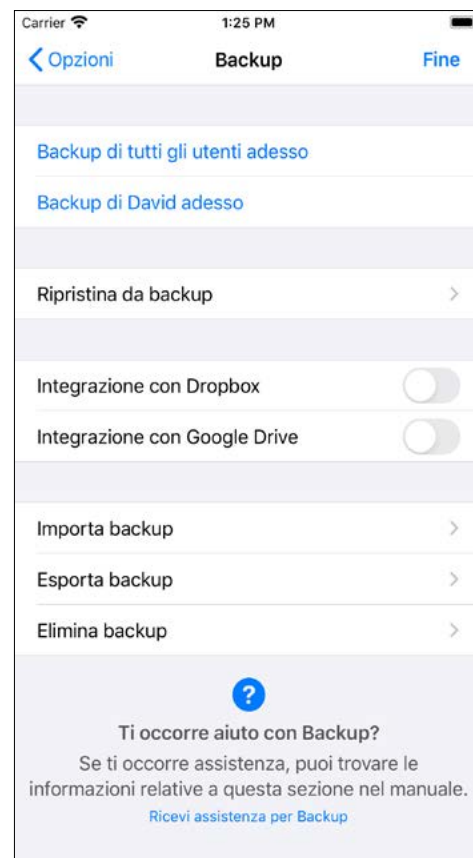

ISTRUZIONI PIÙ DETTAGLIATE

Per ulteriori informazioni, vedi:
www.assistiveware.com/product/proloquo4text/resources



15. Opzioni: blocco delle opzioni

BLOCCO DELLE OPZIONI

Imposta l'opzione **Blocca** su SÌ per limitare l'accesso alle **opzioni** attraverso una password ed evitarne la modifica accidentale da parte di un utente. Quando l'opzione **Blocca** è attivata, è necessario inserire la password corretta per avere accesso alle **opzioni** di Proloquo4Text. Se non ricordi la password, contatta proloquo4text@assistiveware.com per ricevere assistenza.





16. Opzioni: Informazioni, assistenza e novità

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni su Proloquo4Text, accedi alle opzioni **Informazioni** e **Assistenza**. In **Informazioni** puoi visualizzare la versione dell'app installata. In **Assistenza** troverai i link alle risorse relative all'assistenza e alla community presenti sul nostro sito. Inoltre, dalla sezione **Assistenza**, puoi accedere anche a questo manuale.

AIUTO CONTESTUALE

In gran parte delle schermate di **Opzioni**, nella parte inferiore troverai un link che ti darà maggiori informazioni riguardo a ogni specifica opzione.

NOVITÀ

Nella sezione **Novità** trovi le ultime notizie sul Proloquo4Text e argomenti correlati.





Manuale di Proloquo4Text

Versione 4.0

CONTATTA PROLOQUO4TEXT

support@assistiveware.com

RISORSE SU PROLOQUO4TEXT

www.assistiveware.com/product/proloquo4text/resources

VIDEO SU PROLOQUO4TEXT

www.assistiveware.com/e-learning-videos

Proloquo4Text è un marchio registrato di AssistiveWare B.V. AssistiveWare è un nome commerciale e un marchio registrato di AssistiveWare B.V. negli Stati Uniti e in altri paesi. App Proloquo4Text e Manuale © 2019 AssistiveWare®. Tutti i diritti riservati.

AssistiveWare
Laurierstraat 193
1016 PL Amsterdam
Paesi Bassi
fax: +31-20-6128266
www.assistiveware.com